

# VIBONE nezu 3

## オペレーションマニュアル



## 目次

1. はじめに	P.1
2. 同梱物を確認する	P.1
3. ボタン機能を確認する	P.2
4. 本体にイヤホンケーブルを装着する	P.3
5. 自分に合うイヤホンパーツとサイズを選ぶ	P.4
6. イヤホンを耳に装着する	P.6
7. 本体電源を入れる/切る	P.8
8. 音量を調節する	P.9
9. 聞こえに合わせて音質を変える	P.10
10. ノイズを調節する	P.11
11. ワイヤレス機能を使ってスマートフォンなどと接続する	P.12
12. 本体を充電する	P.14
13. 専用アプリで操作する	P.15
① スマートフォンにアプリをインストールする	P.15
② アプリを起動する	P.15
③ nezu3本体を準備する	P.16
④ nezu3とBluetooth接続する	P.16
⑤ アプリで音量・音質を調整する	P.17
⑥ アプリでモードを切り替える	P.19
⑦ アプリを終了する	P.19

# 1. はじめに

この商品は聞こえにお困りのかた向けに開発した骨伝導集音器です  
音を振動に変え、その振動を耳全体でしっかり掴むことで、音として伝わる仕様となっています

ご利用シーンがさらに広がる!  
進化した6つの機能



# 2. 同梱物を確認する

同梱物を確認する



本体(白or黒)

Type-Cケーブル

イヤホン(左右一対)

イヤーパーツ:

イヤーバンパー S/M/L/2L

イヤークッション S/M/L/2L/3L

イヤークリップ S/M/L

風防

本体とイヤホン、イヤホンパーツなどの付属品が同梱されています  
内容物をご確認ください

### 3. ボタン機能を確認する

本機器は6つのボタンで構成されています

ボタン機能を確認する



音量ボタン

これら4つのボタンは左右それぞれの音量を個別に調節することが出来る音量ボタンです

ボタン機能を確認する



右側の丸ボタンは電源ボタンです  
電源のON・OFFおよび、モードの切り替えができます

### 3. ボタン機能を確認する

ボタン機能を確認する



左側の丸ボタンは音調整ボタンです  
音質の調整および、ノイズの調節ができます

### 4. 本体にイヤホンケーブルを装着する

本体左右のイヤホンジャック穴にイヤホンケーブルを奥までしっかり挿し込みます。  
本体ボタンがある面が体側になるように首から掛けてお使い頂きます。

本体にイヤホンケーブルを装着する



イヤホンは左右の区別なくどちらでも挿し込みできます

# 5. 自分に合うイヤホンパーツとサイズを選ぶ

イヤバンパーは軽度～中度難聴のかたにおすすめのパーツです  
耳穴は塞がず、耳の窪みにイヤホンを当てて振動をキャッチします

自分に合ったイヤホンパーツとサイズを選ぶ



## イヤバンパー



S



M



L



2L

イヤバンパーはイヤホンが脱落するのを防ぐパーツで  
S, M, L, 2L の4サイズから耳のサイズに合うパーツを選びます

自分に合ったイヤホンパーツとサイズを選ぶ



イヤバンパー  
なし

耳の小さなかたは、バンパー無しでもお使いいただけます

# 5. 自分に合うイヤホンパーツとサイズを選ぶ

自分に合ったイヤホンパーツとサイズを選ぶ



イヤークリップとイヤークラウドは中度～重度難聴のかたにおすすめのパーツです。耳穴を塞いでしっかり振動をキャッチします

自分に合ったイヤホンパーツとサイズを選ぶ



イヤークラウドはイヤホン部に被せてしっかりと振動を伝えるパーツで S, M, L, 2L, 3L の5サイズから耳のサイズに合うパーツを選びます

## 5. 自分に合うイヤホンパーツとサイズを選ぶ

自分に合ったイヤホンパーツとサイズを選ぶ



イヤパッドのLサイズと、イヤチップのSサイズ等と自由に組み合わせて、耳にしっかりと圧着するよう調整します

## 6. イヤホンを耳に装着する

イヤホンを耳に装着する



イヤバンパーまたは、イヤパッドは、切り欠きのある方を耳の前へ来るようにイヤホン部にセットします

## 6. イヤホンを耳に装着する

耳へ装着する場合は、楕円形の出っ張りを一度上方向に向けて耳の窪みに押し当てます



装着しているイヤーパーツが自分に合っているかどうかの目安は、装着した状態で耳に痛みがなく、かつ、しっかりと耳のくぼみ内に固定された状態であれば大丈夫です。



# 7. 本体電源を入れる/切る

電源を入れる：本体右側のウラ面にある一番上の電源ボタンを長押しします

電源を切る：本体表面インジケータランプが消灯するまで電源ボタンを長押しします

本体電源を入れる / 切る



左表面

右表面

**電源 ON**

- 点灯：バッテリー残量表示
- 点灯：集音モード
- 点灯または点滅：外部機器接続モード

電源が入ると本体オモテ面右側のインジケータランプが点灯します  
緑ランプ点灯は集音モード、青ランプ点灯/点滅は外部機器接続モードです

本体左側のインジケータランプが赤色に点灯してバッテリー残量をお知らせします  
バッテリー残量が約20%未満になると赤色ランプ1つが点滅しますので速やかに充電してください

本体電源を入れる / 切る



左表面

右表面

- 点灯：バッテリー残量表示
- 残80%以上
- 残50%
- 残20%
- 点滅 残20%未満

赤色ランプ3つ点灯はバッテリー残量約80%、2つ点灯は残量約50%、  
1つ点灯は残量約20%をお知らせします

## 8. 音量を調節する

音量は10段階で調節できます

聞こえを確認しながら徐々に音量を上げてください



## 9. 聞こえに合わせて音質を変える

お使いいただく方の聞こえに合わせて音質を変えるには本体左側のウラ面にある丸ボタンをオモテ面インジケータに青色ランプが点灯するまで長押しします

聞こえに合わせて音質を変える

左表面

右表面

左側丸ボタン  
長押し

青色ランプ点灯

- 低音強調
- 中音強調
- 高音強調

ランプ点滅は強調無し

青色ランプ点灯後、同じ丸ボタンを短く押すたびにプリセットされた音質に切替わります

丸ボタンを押すのをやめると10秒でインジケータの青色ランプが消灯します

聞こえに合わせて音質を変える

左表面

右表面

左側丸ボタン  
長押し

青色ランプ  
点灯

再び音質を切替える場合は、もう一度本体左側のウラ面の丸ボタンを青色ランプが点灯するまで長押ししてから切替えを行います

# 10. ノイズを調節する

お使いいただく場所に合わせてノイズを調節するには本体左側のウラ面にある丸ボタンを短く押して調節を行います



緑色ランプは10秒で消灯します


再び切替える場合は、同じ丸ボタンを短く押して緑色ランプが点灯してから切替えを行います



## 10. ノイズを調節する

衣服の擦れ音や風切り音が気になる場合は付属の風防を使用します

ノイズを調節する

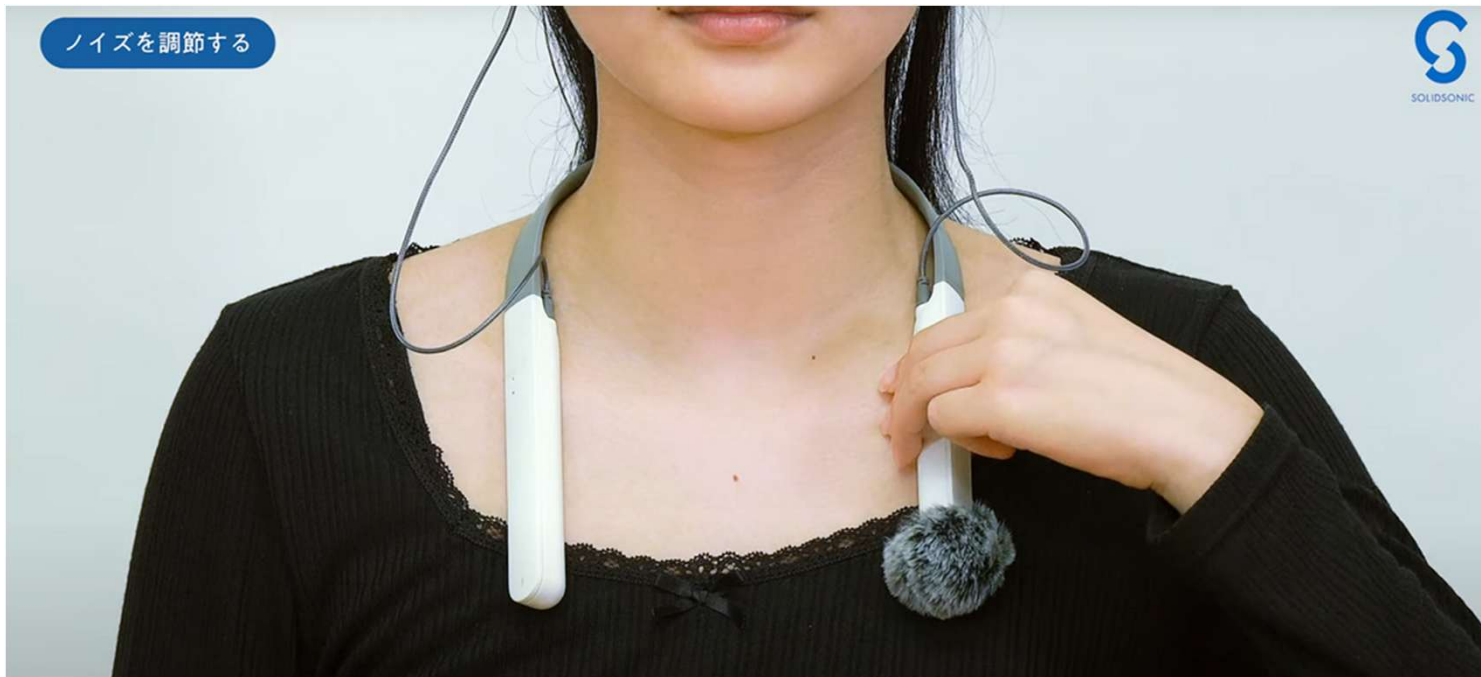

付属の風防を本体左側マイクに被せると  
風切り音などのノイズを低減できます

## 11. ワイヤレス機能を使ってスマートフォン などと接続する

ワイヤレス機能を使って  
スマートフォンなどと接続する




本体右側の一番上の電源ボタンを短く押すとモードが切替わります

# 11. ワイヤレス機能を使ってスマートフォンなどと接続する



本体右側オモテ面のインジケータに青色のランプが点灯または点滅している時は集音マイクがOFFとなり、外部接続モードに切替わります

青色ランプが点滅していればBluetooth接続の同期状態です  
接続したいスマートフォン等の設定でBluetooth接続を行ってください  
本機器の名称【NEZU-3】を選択して接続します

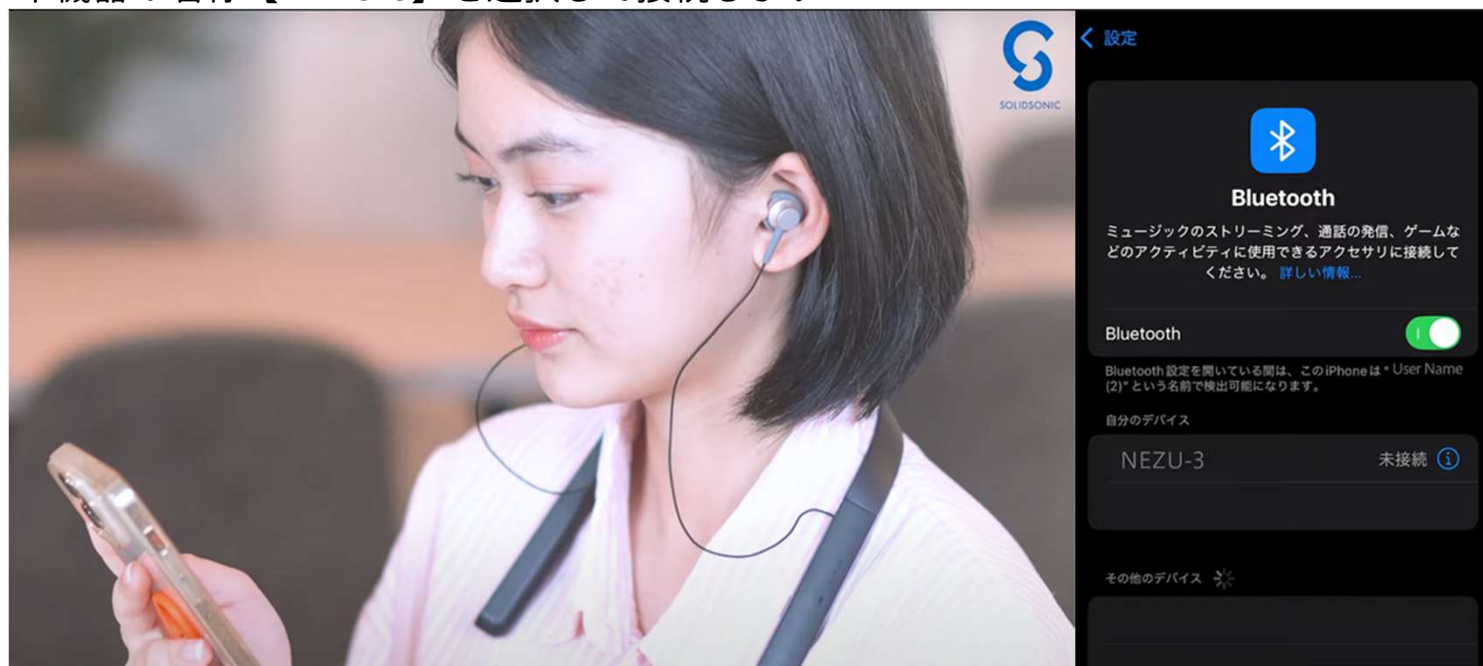

一度接続設定を行った機器は、次からモード切替ボタンを押すだけで自動で繋がります

集音モードに切替えるには本体右側の電源ボタンを短く1度押します

## 12. 本体を充電する



満充電で約12時間ご使用いただけます

(ご使用の環境や音量設定によって動作時間が少なくなる場合があります)

防水機能が備わっているため、充電が完了したら充電口カバーはしっかりと閉じてください



# 13. 専用アプリで操作する

## ① スマートフォンにアプリをインストールする

iPhoneの場合



Androidの場合



アプリ名【nezu 3】をインストールします





## ② アプリを起動する

アプリをタップして開きます

初めてアプリを使用する際に「ご利用にあたっての注意事項」が表示されます

アプリ利用規約に【同意する】ことで、このアプリの利用を開始します

2回目以降はこの画面は表示されません

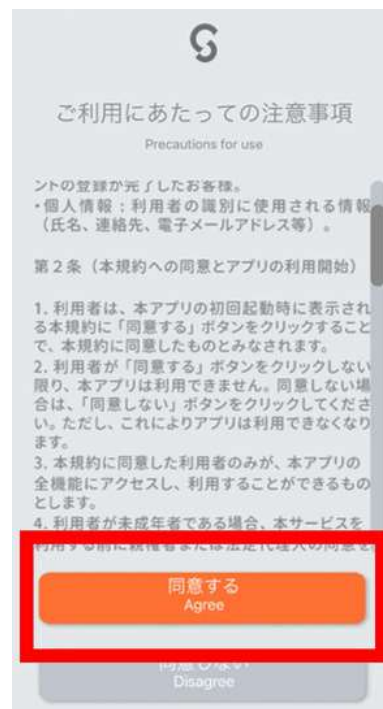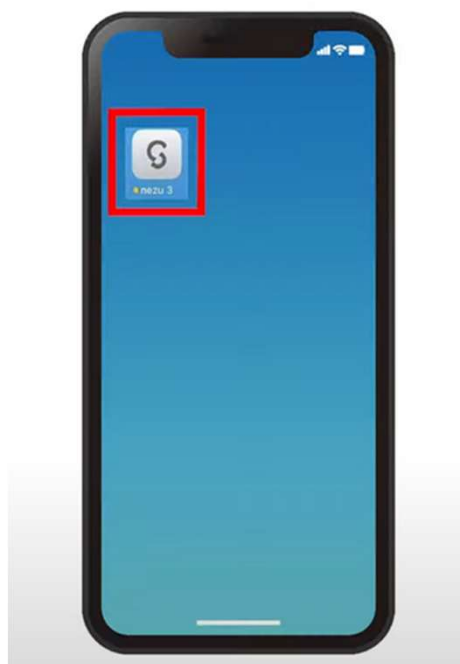

# 13. 専用アプリで操作する

## ③ nezu3本体を準備する



## ④ nezu3とBluetooth接続する

nezu3アプリをインストールした機器と他の機器がBluetooth接続されていないことを確認してください（もし、接続されている場合は、その接続を解除します）

【デバイスを追加する】▶【NEZU3と接続する】▶操作画面へ進みます



# 13. 専用アプリで操作する

## ⑤ アプリで音量・音質を調整する



### 音量の調節

音量スライダーを左右にスライドさせることで変更できます

イヤホン左右の音量は別々に調整することができます

音量「10」に設定しても足りない場合は、更に2段階音量が上がる「ブーストモード」をご使用いただけます

### ▶注意◀

聞こえを確認しながら徐々に音量を上げてください



### ノイズリダクションの操作

集音モード時のみ設定が可能です

お使いいただく場所や、聞こえに合わせてタップして切り替えます

off：ノイズリダクション無し

25%：ノイズを25%カット

50%：ノイズを50%カット

75%：ノイズを75%カット

# 13. 専用アプリで操作する

## ⑤ アプリで音量・音質を調整する 音質の調整

プリセット済みの音質で調整する方法と、ご使用者の聞こえに合わせて調整できる【カスタムEQ】の2通りの方法があります



- 標準音質の操作



お好みの音質をタップして切り替えます



- カスタムEQの操作

【カスタムEQ】をタップします

低音域・中音域・高音域について、  
1～6までのレベルで調整、数値は大きいほど音質を強調  
好みの音質は3つまで登録できます

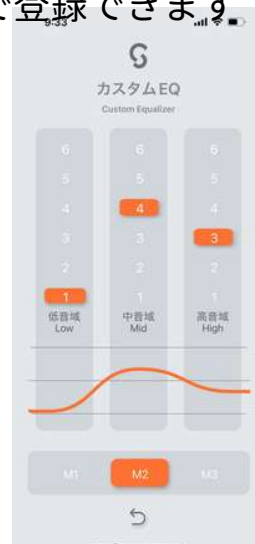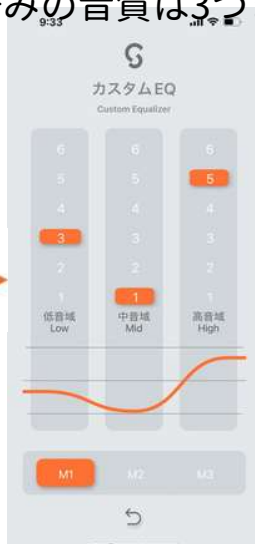

# 13. 専用アプリで操作する

## ⑥ アプリでモードを切り替える

モードを切り替える場合は使いたいモードをタップします



## ⑦ アプリを終了する

アプリを終了するには、アプリ画面の右上部【三】をタップして終了します





SOLIDSONIC

オペレーションマニュアルは動画でもご覧いただけます



お問い合わせはこちら

